

SKYLLEROMMET


Guide til effektiv og hygienisk bruk av bekkenspyler og instrumentvasker

Trygge og faste rutiner for rengjøring og desinfeksjon av medisinsk utstyr er viktig for å oppnå tilfredsstillende vaskeresultat og unngå smittespredning.

Husk god håndhygiene og beskyttelsesutstyr!

Før du starter:

Huller/dyser som spylor vann inn i maskinen er frie for smuss.

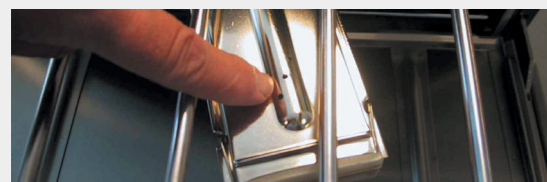

Riktig produkt er tilkoblet, merkingen på maskinen eller røret ned i kannen/stigerøret tilsvarer etiketten på produktet.

Produktbeholderen har nok rengjøringsmiddel. Skift kanne når den er tom.

Prosess for håndtering:

- 1 Urent utstyr settes på uren side.
- 2 Fyll maskin, husk riktig stabling.
- 3 Start vaskeprogram.
- 4 Utfør håndhygiene.
- 5 Ta ut rent utstyr for inspeksjon.
- 6 Inspisert og rent utstyr settes i ren sone.
- 7 Når du forlater rommet skal håndhygiene alltid utføres.

Etter endt arbeidsøkt:

Sørg for at maskinen er tømt for rent utstyr.

Rengjør og desinfiser alle arbeidsflater, utside bekkenspyler, håndvask med kraner og berøringspunkter. Jobb fra rent til skittent.



Oxivir Excel Wipes


Trygg og effektiv rengjøring og desinfeksjon.

Vedlikehold og periodisk tilsyn:

Vurder behov for periodisk tilsyn og tilkall hjelp/service om nødvendig.

Innsiden av maskinen skal være blank og fin, bruk *Suma Antikalk D54* for å fjerne belegg.

Merk av på kanne med tusj regelmessig med nivå og dato for å sjekke at maskinen bruker rengjøringsmiddel.

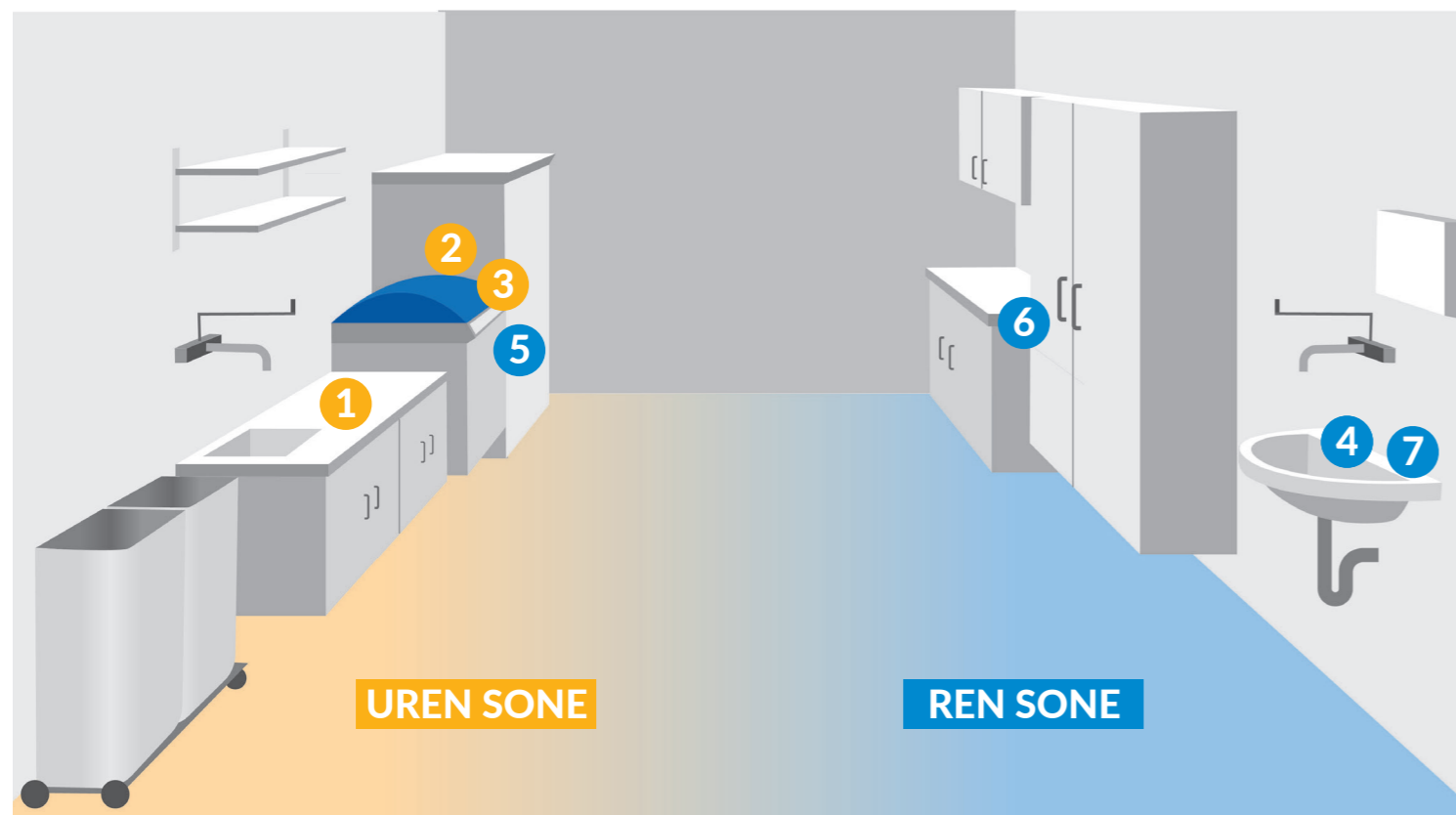

Anbefalte produkter:

TIL BEKKENSPYLER:



DekoRen+ Ultra*
Til vanskelig løselig smuss og utfordrende vannkvaliteter.

*Vår anbefaling



DekoRen+ Mild
Til lett løselig smuss.

VED BELEGG I MASKIN:



Suma Antikalk D54

Bland Suma D54 med vann på en lavtrykksprøyte. Påfør blandingen på misfargede områder og synlig belegg. La produktet virke litt, ca. 5 minutter. Start vaskeprogram, gjenta til belegget er borte.

Se metodekort for detaljer.

TIL INSTRUMENTVASKER:



DekoRen+ Enzym
Effektiv og skånsom enzymbasert vask.



DekoRen+ Tørr
Raskere tork uten skjolder.

BLØTLEGGING AV GODS:



DekoRen+ Enzym

Enzymatisk spesialmiddel.

Ved bløtlegging av gods med inntørrket smuss, bruk 3-5 ml/liter lunkent vann (ca. 35-40 °C). La utstyret ligge i 10 min. Lenger ved behov.

Viktig! Alt utstyr må være rengjort for å oppnå tilfredsstillende desinfeksjon. Utstyr demonteres før vask, og settes sammen først når det er tørt.